

Información sobre el producto

MD 535 eliminador de yeso



MD 535 - breve descripción

- Solución lista para el uso destinada a la eliminación de yeso y alginatos de cubetas de impresión, espátulas de mezcla, cuchillos para yeso, tazas mezcladoras (también de aparatos de mezcla al vacío), materiales protésicos de todo tipo, reguladores de ortodoncia, etc.
- Extraordinario poder limpiador. Elimina la suciedad más incrustada.
- Adecuada para el uso en aparatos de ultrasonidos (p. ej., Hygasonic de Dürr Dental).
- Con indicador de actividad.

Propiedades

MD 535 del sistema Dürr Higiene es un limpiador especial neutro con un gran poder limpiador para la eliminación de yeso y alginatos de cubetas de impresión, espátulas de mezcla, cuchillos para yeso, tazas mezcladoras (también de aparatos de mezcla al vacío), materiales protésicos de todo tipo, reguladores de ortodoncia, etc.

Composición del producto

MD 535 se basa en una combinación de agentes complejantes (15 al 30 %), componentes detergentes alcalinos (< 5 %) y adyuvantes.

Aplicación

MD 535 se utiliza sin diluir. Introduzca las piezas que deben limpiarse en MD 535 y deje que el producto actúe. El proceso de limpieza se acelera mediante el empleo de un aparato de ultrasonidos (Hygasonic de Dürr Dental, por ejemplo) y mediante calentamiento a 50 °C como máximo.

Impacto ambiental

Las sustancias contenidas en MD 535 son biodegradables. El embalaje, de polietileno, se puede destinar a la producción de energía o reciclarse. Para el reciclaje, enjuague la botella con agua.

Datos físicos

Aspecto: líquido transparente incoloro

Densidad: $D = 1,16 \pm 0,01 \text{ g/cm}^3$ (20 °C)

pH: $8,0 \pm 0,5$

Vida útil

4 años

Presentación

Botella de 2,5 l

Almacenamiento

Almacenar el producto entre 5 °C y como máximo la temperatura

Información sobre el producto MD 535 eliminador de yeso

ambiente.

Notas generales

No utilice MD 535 para cubetas de impresión de aluminio. Se pueden producir cambios en el color y olor del producto, especialmente cuando se almacena expuesto a la luz solar. No obstante, estos cambios de color y olor no influyen sobre la capacidad desinfectante del producto.

Advertencias de seguridad

MD 535 está clasificado y etiquetado según el reglamento CLP: ver etiquetado y ficha de datos de seguridad del producto.

Distribuido por

Dürr Dental SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Fabricante

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Germany
www.orochemie.de
info@orochemie.de